



TABLES À MANGER HAUTEUR VARIABLE ASSISTÉE - MTA (TAMEA)



Chambre médicalisée - Long séjour / Alzheimer



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Tables à manger Hébergement Long séjour / Alzheimer	8
Nos exclusivités	
Easy CLEAN	10
Personnalisation	11
Nos points forts	
Hauteur variable (Confort)	13
Piètement (Adaptabilité)	14
Confort (Sécurité)	15
Les caractéristiques	
Robustesse	17
Plateau configurable	18 - 19
Piètement	20
Spécificités techniques	21
Options & Nuancier	31
Une maintenance préventive qui s'adapte à vous	34
Les avantages de la maintenance préventive	35
Nos prestations de maintenance préventive	36





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Un niveau de certification de premier plan



TABLES À MANGER HÉBERGEMENT

Long séjour / Alzheimer

Hauteur variable assistée - MTA (TAMEA)





NOS EXCLUSIVITÉS

Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant. EasyClean®, c'est la garantie d'un



Easy CLEAN

Surface lisse sans zone de rétention, **facile à nettoyer** et désinfecter pour un environnement sûr. Sa structure tubulaire simple à nettoyer **évite tout risque de rétention**.



Dans les environnements de soins, chaque détail contribue à créer une atmosphère rassurante et fonctionnelle. La personnalisation des équipements, même les plus simples, permettent de renforcer l'identité visuelle de l'établissement tout en favorisant le confort du patient.

Au-delà de l'esthétique, ces choix ont un impact concret sur la qualité perçue des espaces de soin. Ils participent à créer un cadre apaisant, cohérent et professionnel, essentiel pour le bien-être des patients comme pour le



Personnalisation

Un **large choix** de décors pour harmoniser votre table avec votre environnement. Le design s'**adapte** à vos exigences esthétiques, tout en conservant sa **résistance**.





NOS POINTS FORTS

Hauteur variable (Confort)




Grâce à un système de réglage par vérin à gaz, la hauteur peut être **ajustée facilement** entre 75 et 110 cm, **sans effort**.

Cette amplitude permet d'**adapter** la position de la table à celle du patient tout au long de la journée en garantissant une posture de travail **ergonomique** pour les soignants.

La descente est entièrement **sécurisée** afin d'éviter tout risque de coincement accidentel, **protégeant** ainsi l'intégrité du patient.

Cette **double sécurité** mécanique et fonctionnelle assure un environnement de soins **serein**, où **confort**, **autonomie** et **prévention** des risques sont pleinement intégrés.

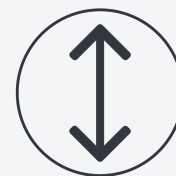

Pour répondre à tous les besoins, la table se décline avec deux types de piètement.

Le modèle en U offre une **stabilité** parfaite, idéale pour les repas au lit ou les moments de repos.

Le modèle en C, plus **mobile** et **ergonomique**, se glisse facilement sous un lit ou un fauteuil, facilitant l'accès et le confort du patient.

Cette double option permet de choisir la configuration la plus adaptée à chaque environnement, tout en **simplifiant** le travail du personnel et en garantissant une utilisation sûre et **agréable** au quotidien.



La remontée assistée du plateau est une fonction de **sécurité** essentielle qui prévient tout risque accidentel de coincement lors des mouvements du lit ou des réglages.

Ce système **protège** le patient et simplifie le travail des soignants, en offrant une utilisation fluide et **sans effort**. Il garantit confort, **sérénité** et **sécurité** dans les environnements de soins, tout en contribuant à une **ergonomie** optimale pour le personnel.



LES CARACTÉRISTIQUES



Finitions haut de gamme

Grâce aux bouchons qui terminent chaque tube, aucun liquide ne pénètre dans la structure, **éliminant** tout **risque d'oxydation**.

Le châssis, conçu en acier robuste, assure une **excellente tenue** dans le temps. Cette conception **facilite** le travail des soignants, garantit une **hygiène optimale** et réduit les interventions SAV.

La table devient ainsi une solution **fiable** et **durable**, pensée pour améliorer le **confort** des équipes et répondre aux exigences des environnements hospitaliers.



Charge maximale

Grâce à sa **conception robuste**, cette table à manger supporte jusqu'à 25 kg en toute **sécurité**.

Ce poids élevé permet d'y poser aussi bien des plateaux repas que du matériel ou des effets personnels.

Sa surface **stable** et **résistante** assure une utilisation **fiable** au quotidien, quel que soit l'utilisateur.



Matériaux

Nos matériaux ont été rigoureusement sélectionnés pour leur **résistance** à un **usage intensif** et leur durabilité dans le temps.

Le châssis en aluminium anodisé offre une **excellente tenue** face aux chocs et à la corrosion.

Le plateau, conçu en fibre végétale haute densité, **résiste aux liquides** même sur de longues périodes.

Cette conception garantit une **fiabilité optimale**, tout en répondant aux exigences des environnements hospitaliers.



Deux largeurs pour s'adapter à toutes les situations

Nos tables à manger offrent une **large surface** pensée pour accompagner les besoins quotidiens du patient.

Disponibles en deux largeurs, **90 et 110 cm**, elles **s'adaptent facilement à la configuration du lit** pour garantir confort et ergonomie à chaque usage.



Grand plateau fixe avec galerie

Le grand plateau fixe offre une **surface généreuse** pour les repas, les activités ou le matériel nécessaire au quotidien.

Sa galerie métallique **maintient** les objets en place, même lors des déplacements ou réglages, évitant les chutes et renforçant la **sécurité**.

Cette conception garantit **confort, praticité** et **sérénité** pour le patient tout en facilitant l'**organisation** pour les soignants.

Le plateau est **disponible avec ou sans réglette** de lecture, afin de s'adapter à tous les usages.




Grand plateau inclinable et plateau latéral avec galerie

Le grand plateau offre une **large surface** adaptée à tous les usages du quotidien. Inclinable en six positions, il **s'ajuste** à la posture du patient et favorise son **autonomie** lors des repas, de la lecture ou des activités.

Sa réglette intégrée **maintient** un livre ou une tablette à la verticale pour plus de **confort**.

La galerie périphérique **empêche la chute** d'objets lors des mouvements, assurant **sécurité** et **sérénité** pour le patient comme pour le personnel soignant.


Plateau configurable

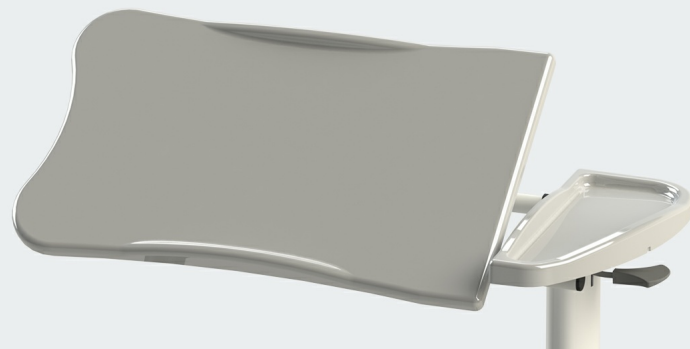

Plateau principal inclinable en ABS et plateau latéral fixe en ABS

Composé d'un plateau principal et d'un plateau latéral, tous deux en **ABS** pour garantir **robustesse** et **praticité**. Le plateau principal est **inclinable** et **réglable** sur 6 positions, permettant de **s'adapter** à la posture du patient tout en offrant un rebord discret qui limite les risques de glissement des objets.

Le plateau latéral, fixe et doté d'un rebord intégral, constitue un **espace sécurisé** pour boissons ou objets du quotidien, assurant **confort** et **fonctionnalité**.

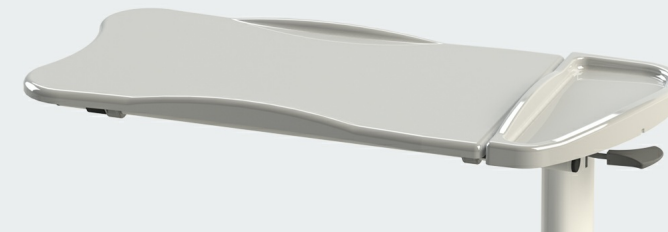

Plateau principal fixe en ABS et plateau latéral fixe en ABS

Deux plateaux fixes en ABS pour une **stabilité** optimale et une **utilisation simplifiée**. Le plateau principal offre une surface robuste avec bords légèrement relevés pour **maintenir les objets** en place, tandis que le plateau latéral, doté d'un rebord intégral, garde boissons et accessoires à portée de main. **Sans réglages**, cette conception assure **confort**, **fiabilité** et **durabilité**, idéale pour les environnements où la stabilité est prioritaire.



Piètement en C

Le large piètement, équipé de **4 roulettes double galets** dont **2 avec frein**, garantit une **stabilité** optimale et une **mobilité fluide**, même dans les espaces réduits.

Sa conception en C permet de glisser la table sous le lit ou le fauteuil sans gêner le patient, offrant un **confort maximal** et une **ergonomie** idéale pour le personnel soignant. Cette configuration **facilite** les repas et les activités, tout en **réduisant les efforts** physiques lors des déplacements.

Le système de **freinage intégré** sur deux roulettes assure une **parfaite immobilisation** de la table lorsque nécessaire, renforçant la **sécurité** lors de son utilisation.



Piètement en U

Pensé pour la **stabilité** et la **fluidité** des soins, le piètement en U est équipé de 5 roulettes à double galets de 50 mm de diamètre.

Il s'intègre facilement sous le lit ou le fauteuil, tout en **limitant l'encombrement** dans la chambre. Sa structure **robuste** assure une excellente tenue même lors des mouvements, tandis que ses roulettes assurent un **déplacement fluide** et **sans effort**.

La présence de roulettes à double galets renforce la **maniabilité**, même sur des surfaces irrégulières, et contribue à une meilleure répartition de la charge. Une solution **ergonomique** qui optimise le **confort** du patient et **simplifie** le travail des soignants.



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	18,5 kg
-------	---------

DIMENSIONS

Largeur	96,2 cm
Profondeur	45,5 cm
Largeur grand plateau	75 cm
Profondeur grand plateau	45 cm
Largeur petit plateau	20 cm
Profondeur petit plateau	45 cm
Hauteur Variable mini	75 cm
Hauteur Variable maxi	110 cm

TYPE

Type de hauteur variable	Vérin à gaz
--------------------------	-------------

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau	Panneau de particules - Epaisseur 16 mm - Recouvert d'un plateau plastique ABS
Petit plateau	Bac ABS amovible
Structure - Colonne	Aluminium extrudé
Structure Plateau	Acier peinture époxy
Piètement	Acier peinture époxy
Chants	ABS assortis
Roues	Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement	Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues	50 mm
Hauteur piètement - sol	11 cm

INCLINAISONS

Plateau principal	Crémaillère 6 positions : 0 à 42°
-------------------	-----------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	25 kg
----------------------------	-------

CLASSEMENT FEU

Plastique ABS	M2
---------------	----

MO-TR0C4PM

TABLE À MANGER - PLATEAU PRINCIPAL INCLINABLE EN ABS + PLATEAU LATÉRAL FIXE EN ABS



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	18,5 kg
-------	---------

DIMENSIONS

Largeur	96,2 cm
Profondeur	45,5 cm
Largeur grand plateau	75 cm
Profondeur grand plateau	45 cm
Largeur petit plateau	20 cm
Profondeur petit plateau	45 cm
Hauteur Variable mini	75 cm
Hauteur Variable maxi	110 cm

TYPE

Type de hauteur variable	Vérin à gaz
--------------------------	-------------

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau	Panneau de particules - Epaisseur 16 mm - Recouvert d'un plateau plastique ABS
Petit plateau	Bac ABS amovible
Structure - Colonne	Aluminium extrudé
Structure Plateau	Acier peinture époxy
Piètement	Acier peinture époxy
Chants	ABS assortis
Roues	Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement	Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues	50 mm
Hauteur piètement - sol	11 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	25 kg
----------------------------	-------

CLASSEMENT FEU

Plastique ABS	M2
---------------	----

MO-TR0C4PM-FPM

TABLE À MANGER - PLATEAU PRINCIPAL FIXE EN ABS + PLATEAU LATÉRAL FIXE EN ABS



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité

Spécificités techniques

MO-TR0C5PF

TABLE À MANGER - GRAND PLATEAU FIXE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur 96,2 cm
Profondeur 45,5 cm
Largeur grand plateau 95 cm
Profondeur grand plateau 45 cm
Hauteur Variable mini 75 cm
Hauteur Variable maxi 110 cm

TYPE

Type de hauteur variable Vérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau Fibras végétales - Epaisseur 12 mm
Structure - Colonne Aluminium extrudé
Structure Plateau Acier peinture époxy
Piètement Acier peinture époxy
Roues Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues 50 mm
Hauteur piètement - sol 11 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 25 kg

CLASSEMENT FEU

Stratifié M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Sans réglette



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur 116,2 cm
Profondeur 45,5 cm
Largeur grand plateau 115 cm
Profondeur grand plateau 45 cm
Hauteur Variable mini 75 cm
Hauteur Variable maxi 110 cm

TYPE

Type de hauteur variable Vérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau Fibras végétales - Epaisseur 12 mm
Structure - Colonne Aluminium extrudé
Structure Plateau Acier peinture époxy
Piètement Acier peinture époxy
Roues Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues 50 mm
Hauteur piètement - sol 11 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 25 kg

CLASSEMENT FEU

Stratifié M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE


Commentaire Sans réglette

MO-TR0C5PF-110

TABLE À MANGER - GRAND PLATEAU FIXE - POUR LIT 110 CM



NOS EXCLUSIVITÉS

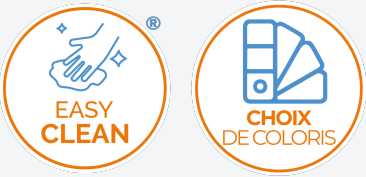

NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur 96,2 cm
Profondeur 45,5 cm
Largeur grand plateau 75 cm
Profondeur grand plateau 45 cm
Largeur petit plateau 20 cm
Profondeur petit plateau 45 cm
Hauteur Variable mini 75 cm
Hauteur Variable maxi 110 cm

TYPE

Type de hauteur variable Vérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau Fibras végétales - Epaisseur 12 mm
Petit plateau Bac ABS amovible
Structure - Colonne Aluminium extrudé
Structure Plateau Acier peinture époxy
Piètement Acier peinture époxy
Roues Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues 50 mm
Hauteur piètement - sol 11 cm

INCLINAISONS

Plateau principal Crémaillère 6 positions : 0 à 42°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 25 kg

CLASSEMENT FEU

Stratifié M1
Plastique ABS M2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire 1 réglette de lecture

MO-TR0C5PMA

TABLE À MANGER - GRAND PLATEAU INCLINABLE + BAC PLASTIQUE LATÉRAL



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité



Spécificités techniques

MO-TR0C5PMA-110

TABLE À MANGER AU LIT - GRAND PLATEAU INCLINABLE - POUR LIT LARGEUR 110 CM

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur116,2 cm
Profondeur45,5 cm
Largeur grand plateau95 cm
Profondeur grand plateau45 cm
Largeur petit plateau20 cm
Profondeur petit plateau45 cm
Hauteur Variable mini75 cm
Hauteur Variable maxi110 cm

TYPE

Type de hauteur variableVérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateauFibres végétales - Epaisseur 12 mm
Petit plateauBac ABS amovible
Structure - ColonneAluminium extrudé
Structure PlateauAcier peinture époxy
PiètementAcier peinture époxy
RouesCorps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètementPiètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues50 mm
Hauteur piètement - sol11 cm

INCLINAISONS

Plateau principalCrémaillère 6 positions : 0 à 42°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible25 kg

CLASSEMENT FEU


StratifiéM1
Plastique ABSM2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire1 réglette de lecture



NOS EXCLUSIVITÉS

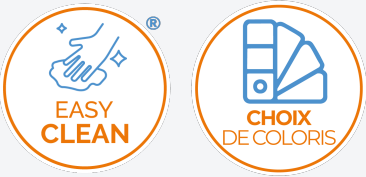

NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur96,2 cm
Profondeur45,5 cm
Largeur grand plateau75 cm
Profondeur grand plateau45 cm
Largeur petit plateau20 cm
Profondeur petit plateau45 cm
Hauteur Variable mini75 cm
Hauteur Variable maxi110 cm

TYPE

Type de hauteur variableVérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateauFibres végétales - Epaisseur 12 mm
Petit plateauFibres végétales - Epaisseur 12 mm
Structure - ColonneAluminium extrudé
Structure PlateauAcier peinture époxy
PiètementAcier peinture époxy
RouesCorps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètementPiètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues50 mm
Hauteur piètement - sol11 cm

INCLINAISONS

Plateau principalCrémaillère 6 positions : 0 à 42°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible25 kg

CLASSEMENT FEU

StratifiéM1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE


Commentaire1 réglette de lecture

MO-TR0C5PMG

TABLE À MANGER - GRAND PLATEAU INCLINABLE + PETIT PLATEAU LATÉRAL AVEC GALERIE



NOS EXCLUSIVITÉS

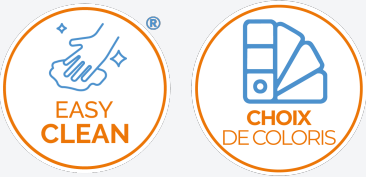

NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité

POIDS - ECO-PERFORMANCES	
Poids	18,5 kg
DIMENSIONS	
Largeur	96,2 cm
Profondeur	45,5 cm
Largeur grand plateau	95 cm
Profondeur grand plateau	45 cm
Hauteur Variable mini	75 cm
Hauteur Variable maxi	110 cm
TYPE	
Type de hauteur variable	Vérin à gaz
MATIÈRES & REVÊTEMENTS	
Grand plateau	Compact HPL - Epaisseur 13 mm
Structure - Colonne	Aluminium extrudé
Structure Plateau	Acier peinture époxy
Piètement	Acier peinture époxy
Roues	Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant
PIÈTEMENT	
Type de piètement	Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues	50 mm
Hauteur piètement - sol	11 cm
CHARGE DE SÉCURITÉ	
Charge maximale admissible	25 kg
CLASSEMENT FEU	
Compact HPL	M1
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE	
Commentaire	Sans réglette



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur96,2 cm
Profondeur45,5 cm
Largeur grand plateau95 cm
Profondeur grand plateau45 cm
Hauteur Variable mini75 cm
Hauteur Variable maxi110 cm

TYPE

Type de hauteur variableVérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateauCompact HPL - Epaisseur 13 mm
Structure - ColonneAluminium extrudé
Structure PlateauAcier peinture époxy
PiètementAcier peinture époxy
RouesCorps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètementPiètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues50 mm
Hauteur piètement - sol11 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible25 kg

CLASSEMENT FEU

Compact HPLM1



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	18,5 kg
-------	---------

DIMENSIONS

Largeur	96,2 cm
Profondeur	45,5 cm
Largeur grand plateau	75 cm
Profondeur grand plateau	45 cm
Largeur petit plateau	20 cm
Profondeur petit plateau	45 cm
Hauteur Variable mini	75 cm
Hauteur Variable maxi	110 cm

TYPE

Type de hauteur variable	Vérin à gaz
--------------------------	-------------

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau	Compact HPL - Epaisseur 13 mm
Structure - Colonne	Aluminium extrudé
Structure Plateau	Acier peinture époxy
Piètement	Acier peinture époxy
Roues	Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement	Piètement en "C" - 4 roulettes dougle galet
Diamètre roues	50 mm
Hauteur piètement - sol	11 cm

INCLINAISONS

Plateau principal	Crémaillère 6 positions : 0 à 42°
-------------------	-----------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	25 kg
----------------------------	-------

CLASSEMENT FEU

Compact HPL	M1
-------------	----

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	1 réglette de lecture
-------------	-----------------------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Adaptabilité
- Sécurité



OPTIONS & NUANCIER

Options

OPTIONS PIÈTEMENTS

4 ROULETTES PIVOTANTES
- DIAMÈTRE 50 MM - DONT
2 ROULETTES FREINÉES -
POUR TABLES À MANGER
AU L ...

OP-M-R50-2F



OPTIONS PIÈTEMENTS

PIÈTEMENT EN U - 5
ROULETTES DIAMÈTRE 50
MM

OP-M-TL-PIED-U



AMÉNAGEMENT

RÉGLETTÉ PLASTIQUE
SUPPLÉMENTAIRE SUR
PLATEAU

OP-M-TL-P-2R-INC



AMÉNAGEMENT

BAC ABS EN
REMPLACEMENT DU PETIT
PLATEAU FIXE

OP-M-TL-FP-ABS



Décors




ATLAS OAK



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE

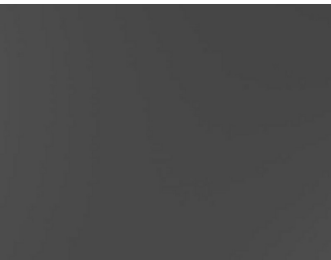

QUARTZ




LIMON



RED CANDY



RICE PAPER

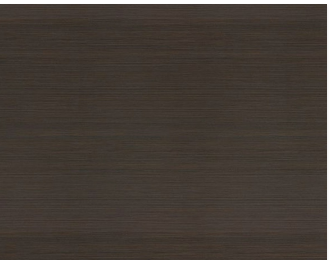

AMAZONIA



ARABICA WALNUT




FIJI OAK




FROZEN BLUE



NORDIC PINE GREY BROWN

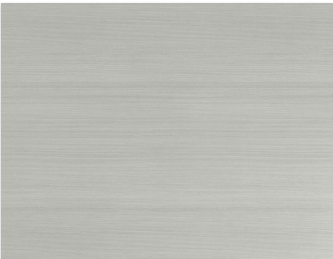

OSLO OAK MINIMAL GREY

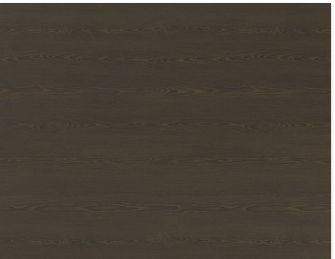


VALLEY ASH PATINATED
BROWN

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel

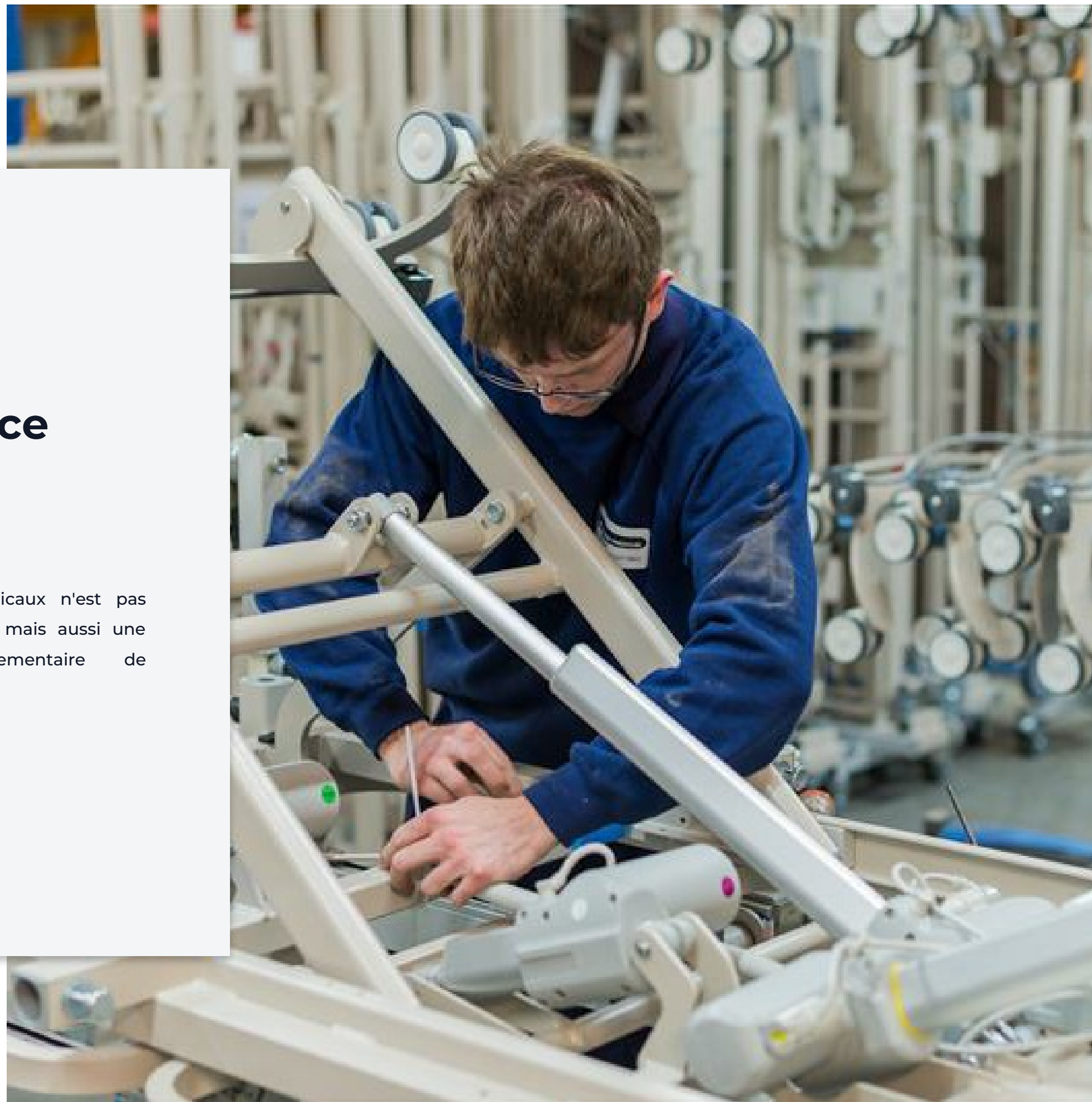

Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.A. La Fosse Neuve Route de Meslay
37210 - Parçay-Meslay

Tél +33 (0)2 47 88 58 85
clientfrance@hacare.com



Benoît LAMERANT
Responsable ventes France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44



Administration des ventes
clientfrance@hacare.com
+33 (0)2 47 88 58 85



Laurent CARRET
Rhône Alpes
axis-agence@wanadoo.fr
04 72 00 89 42



Pauline CEPPE
Centre
p.ceppe@hacare.com
06 28 75 52 19



Pascal CHEVALIER
Auvergne
pascal.chevalier@bptc.fr
04 77 22 44 22



Yann DOMZALSKI
Hauts de France
y.domzalski@hacare.com
06 12 33 74 58



Julien FROMENT
Sud Est
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Benoît LAMERANT
Paris, île de France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44




Julien LE BRUN
Bretagne
julien.le.brun@outlook.fr
06 62 47 46 28



Michaël MUNCH
Grand Est
m.munch@nexusicare.fr
06 17 17 10 64



Julien REDAUD
Sud Ouest
j.redaud@rj-sante.fr
06 62 92 58 66

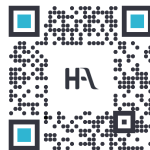

HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-CHA-LS-TAM-TAM-FR 2026