


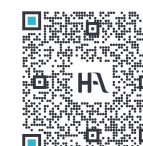

CHARIOTS DE SOINS CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)



Chambre médicalisée - Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Chariots de soins Hébergement Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)	8
Nos exclusivités	
Soft Sound	10
Easy Clip	11
No key concept	12
EasyMov et la 5 ^e roue motorisée	13
Nos points forts	
Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)	15
Plateau sécurisé pour une préparation fiable (Surface de travail)	16
Tablette extensible (Optimiser l'espace)	17
Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)	18
Les caractéristiques	
Mobilité	20
Sécurité	21
Configurable	22 - 23
Informatisation des structures	24
COMPOSANTS : Tiroirs	25 - 26
COMPOSANTS : Cassette	27
Spécificités techniques	28
Options, Accessoires, Composants & Nuancier	37
Une maintenance préventive qui s'adapte à vous	50
Les avantages de la maintenance préventive	51
Nos prestations de maintenance préventive	52





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Un niveau de certification de premier plan



CHARIOTS DE SOINS HÉBERGEMENT

Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)

Chariot sécurisé à tiroirs jointifs - MM3 (MOD'ALLI)






NOS EXCLUSIVITÉS

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.

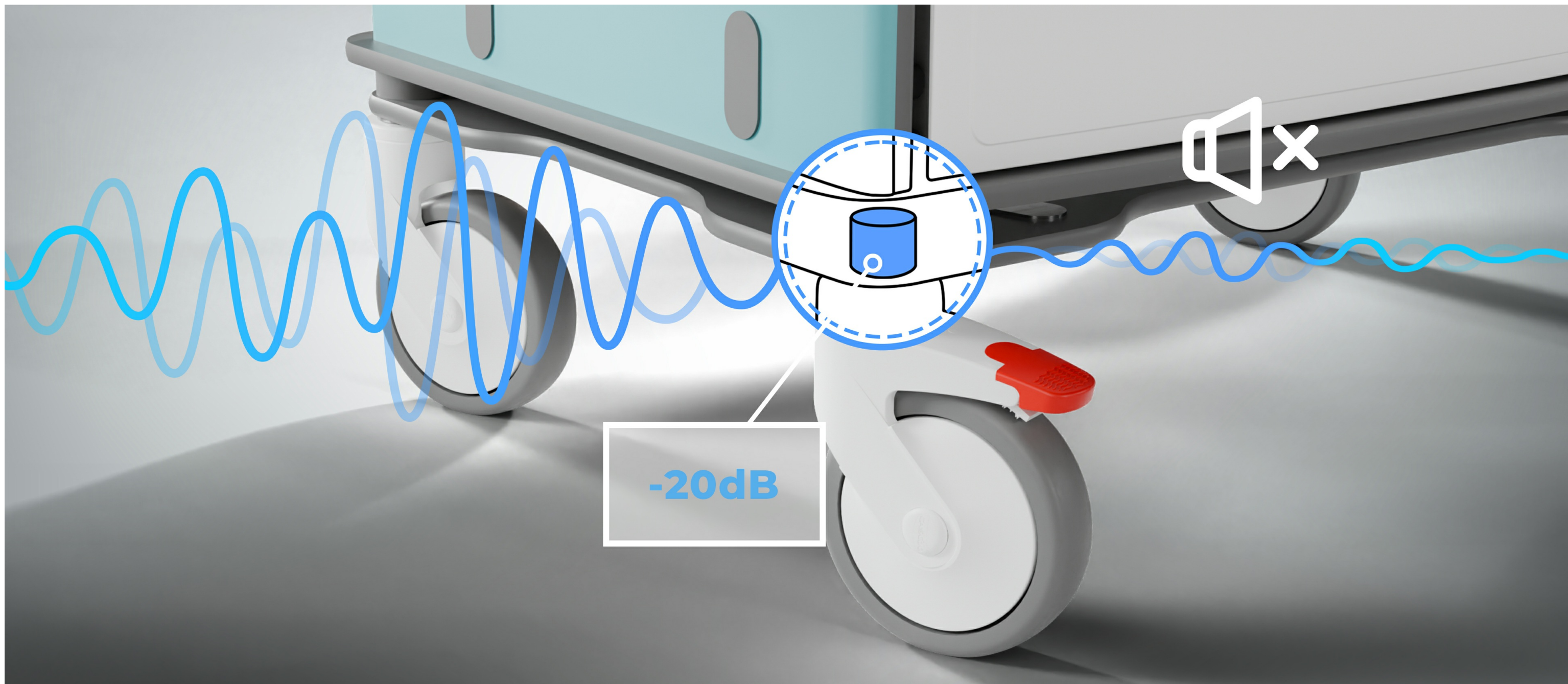

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.


Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

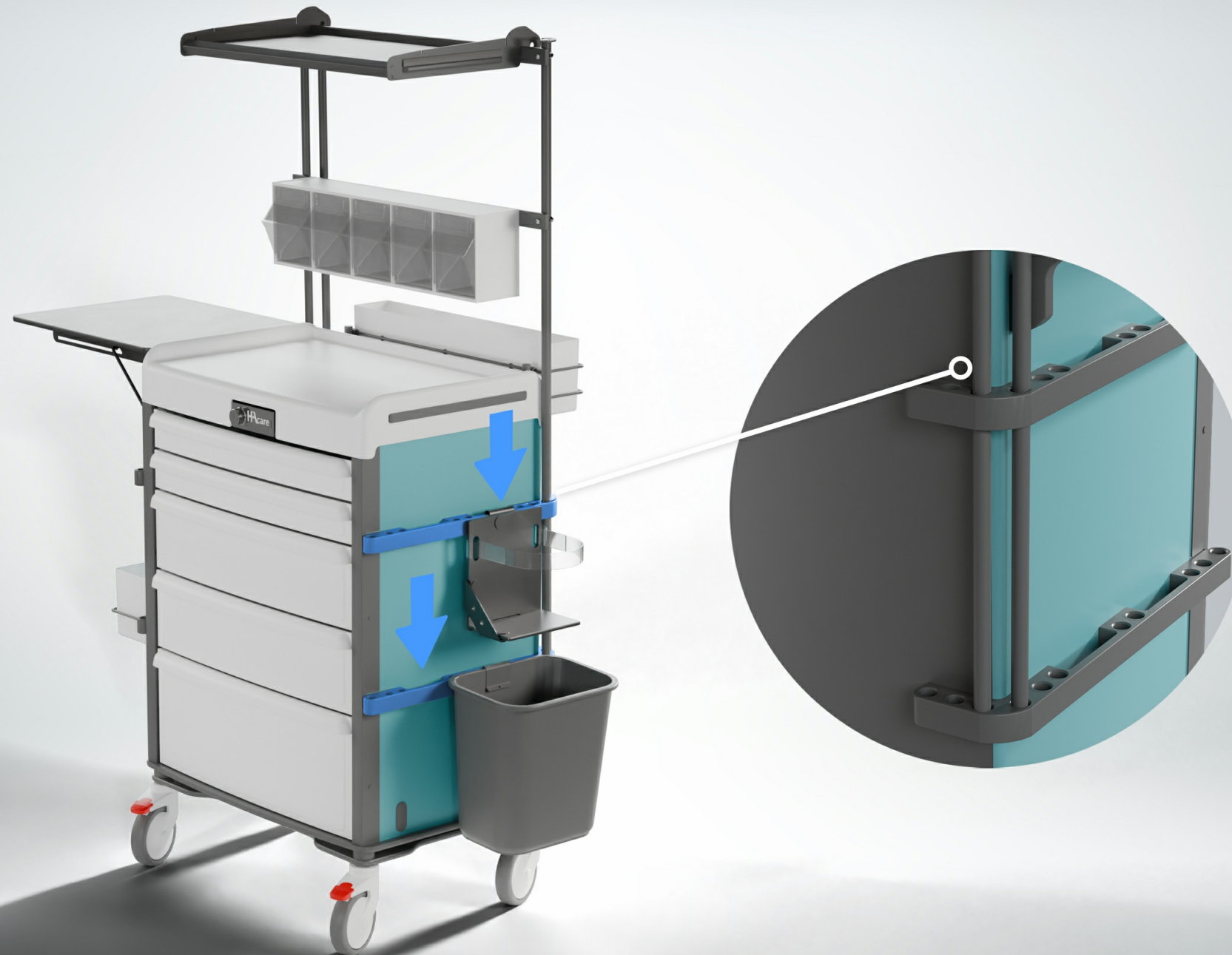

Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.




Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

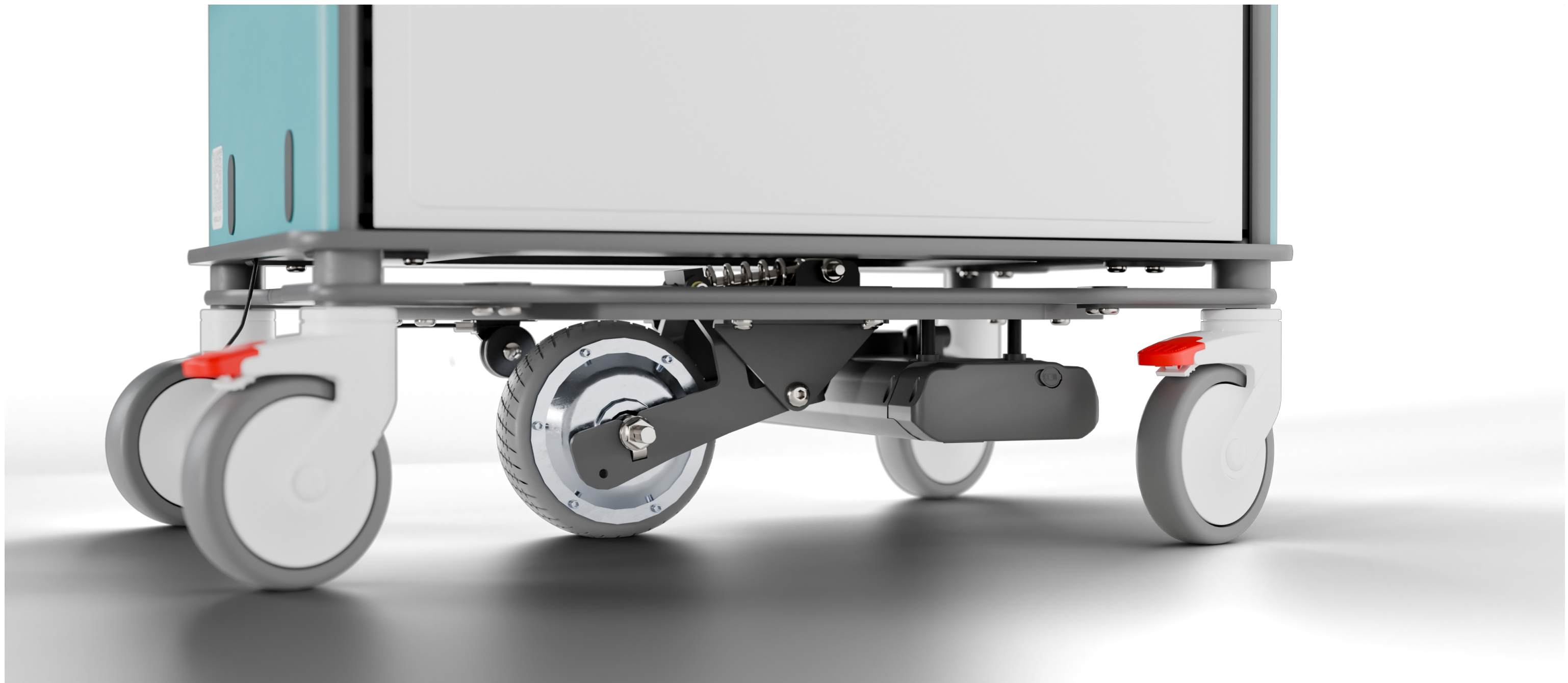



NOS POINTS FORTS


Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)



Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs des **regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.

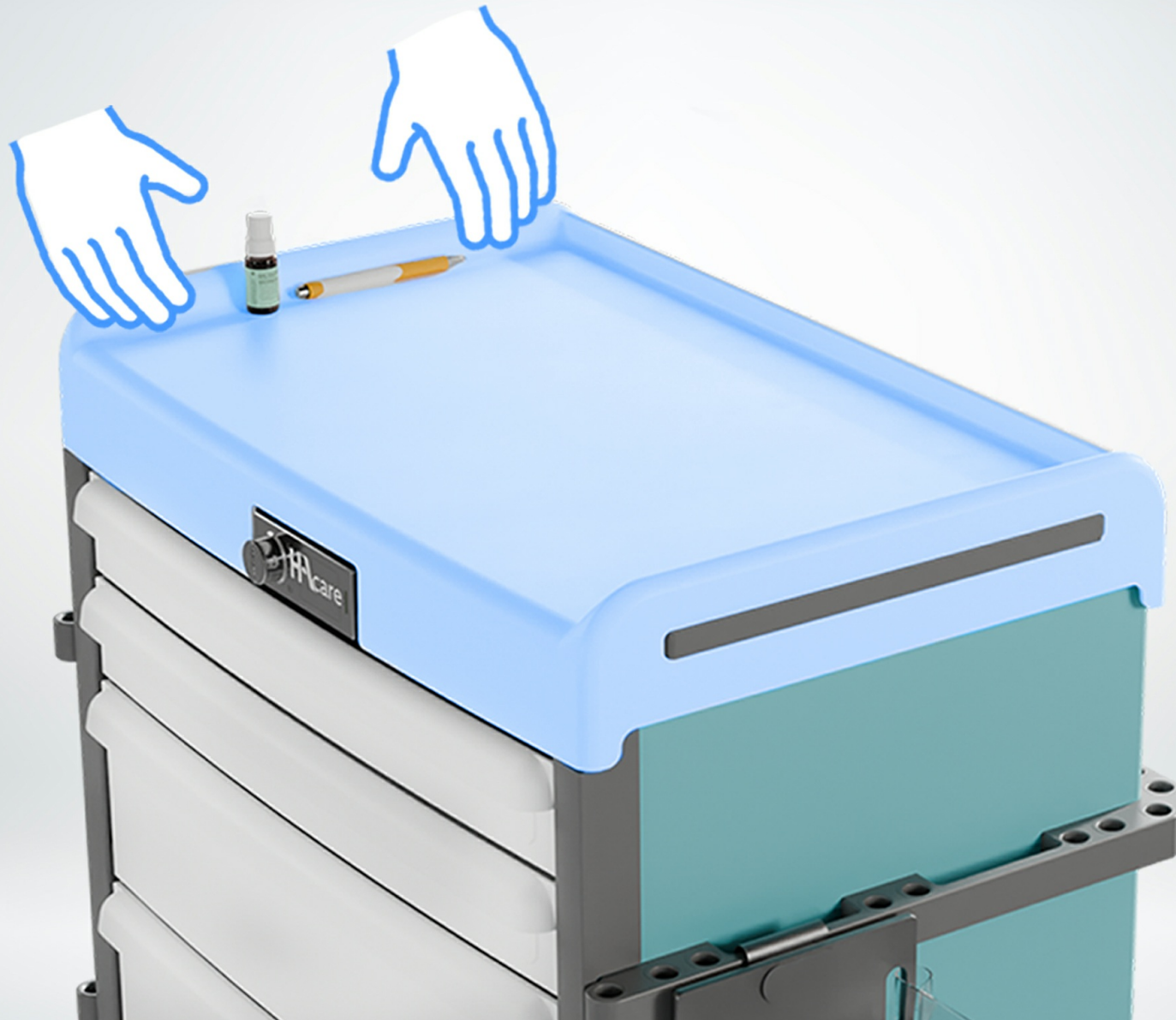

Le **plateau** du mobilier médical est conçu avec un **rebord sur trois côtés** pour garantir une **sécurité optimale** lors de la préparation des soins. Ce design **prévient les chutes d'instruments** ou **de produits**, même en cas de déplacement. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.

Tablette extensible (Optimiser l'espace)



La **tablette coulissante** offre une **extension** pratique de la **surface de travail**, idéale pour optimiser l'espace lors des soins. Associée à des accessoires périphériques, elle permet de **sécuriser** les **flacons** et le **matériel** tout en gardant le plateau principal dégagé. Le premier tiroir, dédié au clavier et à la souris, libère encore davantage l'espace de préparation. Un emplacement STPO complète l'ensemble pour une organisation ergonomique, fluide et parfaitement adaptée aux environnements médicaux exigeants.

Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



LES CARACTÉRISTIQUES



EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.

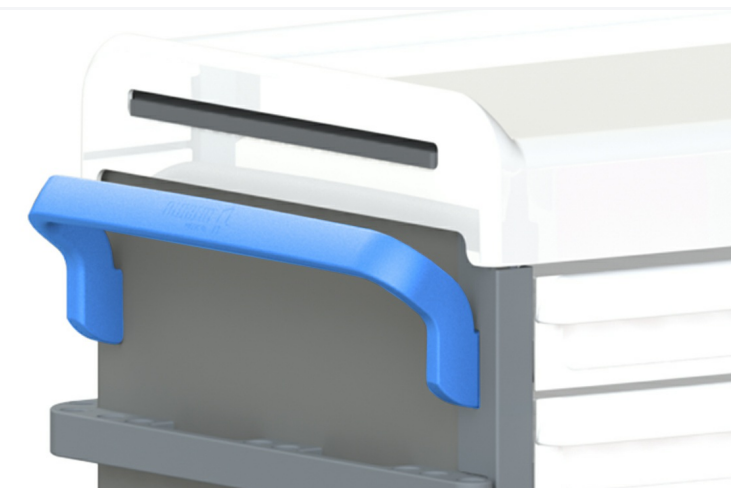

Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et une **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.



Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et un **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.



Verrouillage à clé

Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.




Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. En version P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



Une modularité selon l'usage

Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresseurs et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la préparation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.

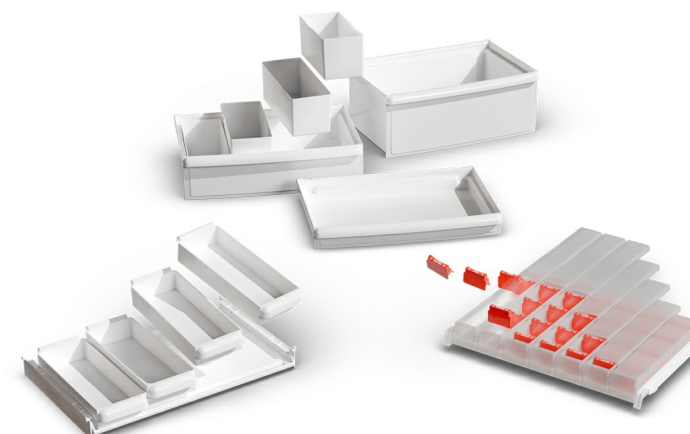

Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



Choisir les couleurs du mobilier médical

Personnalisez votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.



Confort et fiabilité pour le suivi patient connecté

Le **bras informatique** avec platine métal **verrouillable** est conçu pour offrir une utilisation fluide, stable et **sécurisée** lors du **suivi patient**. **Robuste** et ergonomique, il maintient l'équipement en **position idéale** tout en **protégeant le matériel** contre les manipulations non autorisées. Sa **platine verrouillable** assure une fixation **fiable** et un usage en toute **sécurité** dans les environnements de soins exigeants.



Caisson CTSPD

Le **caisson informatique sécurisé** HACARE se transforme en **tablette coulissante** intégrant clavier et souris, idéal pour **accueillir un PC portable**. Il permet un accès rapide et sécurisé aux outils numériques essentiels au suivi des soins. Pensé pour **intégrer** les dispositifs de **suivi patient** dans le quotidien des équipes soignantes, il combine sécurité, ergonomie et praticité, offrant un **espace de travail** optimisé, fluide et organisé, pour un soin plus **efficace** et une gestion **simplifiée** des informations médicales.



Portique informatique

Le **bras avec portique** pour ordinateur HACARE, jumelé à un **tiroir coulissant** équipé de clavier et souris, offre une solution complète pour le suivi des soins. Complété par un **emplacement CTSPD**, ce système permet une intégration ergonomique des **outils informatiques** directement au poste de travail. Il garantit un **accès rapide** et **sécurisé** aux **données patient**, optimise l'espace et fluidifie les gestes quotidiens des équipes soignantes, alliant confort, organisation et efficacité dans tous les environnements de soins.




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV** , préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé** , l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste** , simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave** , les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.

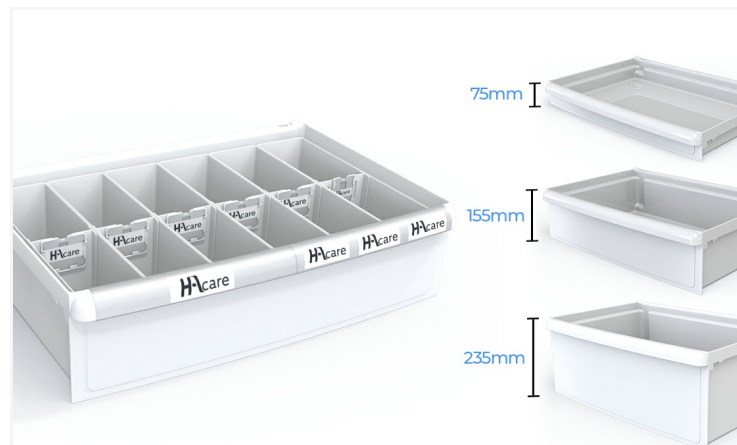

Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.

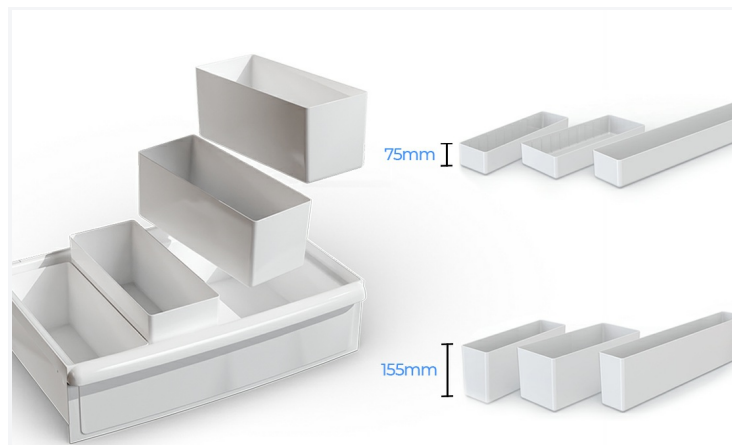

Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.

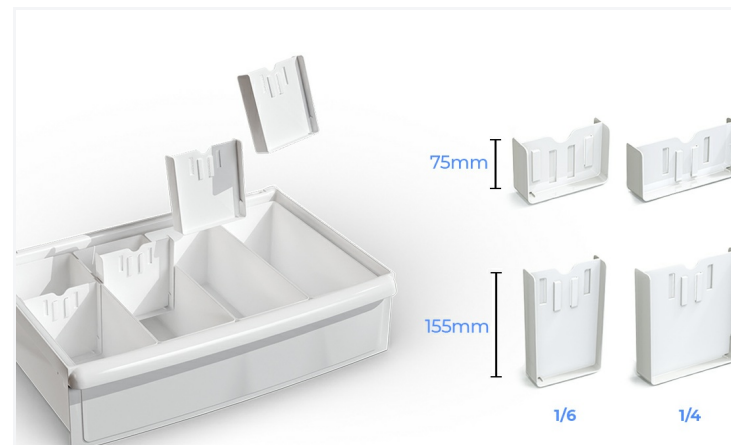

Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.

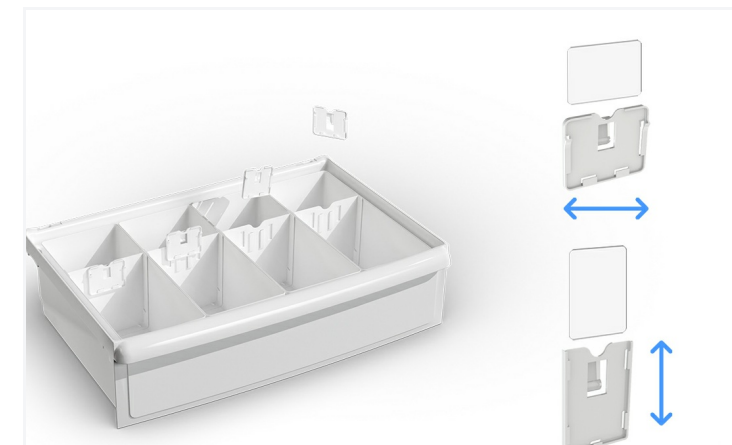

Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



COMPOSANTS : Cassette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.



Spécificités techniques

PP-M60009-V1

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 9G - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46.1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	2 tiroirs 75
•	2 tiroirs 155
•	1 tiroir 235
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	157,4 cm
Profondeur	50,1 cm
Hauteur plateau	117.2 cm
Façade	F600
Hauteur	120.2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	2 tiroirs 75
•	2 tiroirs 155
•	1 tiroir 235
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguilles

PP-M60009-V2

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 9G - AVEC CTSP0 - EQUIPE V2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN



Spécificités techniques

PP-M60009-V3

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 9G - EQUIPE V3

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	2 tiroirs 75
•	2 tiroirs 155
•	1 tiroir 235
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	51,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

• 1 tablette coulissante pour clavier informatique
• 3 tiroirs 75
• 3 tiroirs 155
• portique 2 rails - accessoire pour suspension d'écran avec platine
• poubelle 13L tri sélectif
• support boîte à aiguilles

PP-M60009-V9

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 9G - EQUIPE V9



TJ | 9G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	48,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	2 tiroirs 75
•	4 tiroirs 155
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguille



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	49,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	125,2 cm
Façade	F600
Hauteur	128,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	2 tiroirs 75
•	4 tiroirs 155
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguilles

PP-M60010-V2

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 10G - AVEC CTSP0 - EQUIPE V2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	53,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	109,6 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	1 tablette coulissante pour clavier informatique
•	3 tiroirs 75
•	2 tiroirs 155
•	1 tiroir 235
•	portique 2 rails - accessoire pour suspension d'écran avec platine
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguilles

PP-M60010-V9

CHARIOT DE SOINS MODALLI M3 - F600 10G - EQUIPE V9



10G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	109,6 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

VERROUILLAGE SERRURES

**VERROUILLAGE
ELECTRONIQUE AVEC
BADGE - POUR MODALLI**

OP-M3RFID



VERROUILLAGE SERRURES

**VERROUILLAGE
ELECTRONIQUE AVEC
CODE - POUR MODALLI**

OP-M3CODE



VERROUILLAGE SERRURES

**VERROUILLAGE
MECANIQUE AVEC CLE -
POUR MODALLI**

OP-M3CLE



VERROUILLAGE SERRURES

**CLE PASS POUR SERRURE
MECANIQUE - GAMME M3**

OP-M3CLEPASS



VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT 10 BADGES RFID
UTILISATEURS**

OP-KIT-BADGES-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT BATTERIE DE SECOURS
POUR VERROUILLAGE
ELECTRONIQUE**

OP-KIT-BATTERIE



VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT PASSE USB POUR
VERROUILLAGE A CODE ET
RFID M3 - SANS CODE DE
SECURITE**

OP-KIT-PASSE-USB-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT ADMINISTRATION
POUR VERROUILLAGE
ELECTRONIQUE**

OP-KIT-ADMIN



VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT PASSE USB POUR
VERROUILLAGE A CODE ET
RFID M3 - AVEC CODE DE
SECURITE**

OP-KIT-PASSE-USB-CODE



OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE
125 MM SIMPLE GALET
ANTISTATIQUE**

OP-ROUE125AS



OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE
100 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE100



OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE
75 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE075



ROUE MOTORISÉE

**OPTION ROUE MOTORISÉE
POUR MOBILIER
MODULAIRE M3**

OP-M3EZGO



ROUE MOTORISÉE

**OPTION DÉBRAYAGE POUR
ROUE MOTORISÉE SUR
MOBILIER MODULAIRE M3**

OP-M3DEB



INFORMATISATION

**CAISSON INFORMATIQUE
(CTSPO) QUARTZ
(SERRURE NON INCLUSE) -
POUR MODALLI**

OP-M3CTSPO



INFORMATISATION

**TABLETTE COULISSANTE
POUR CLAVIER
INFORMATIQUE POUR
MODALLI**


OP-M3TABCLAVIER



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE COULISSANTE
INTÉGRÉE AU PLATEAU -
POUR MODALLI**

OP-M3TABL

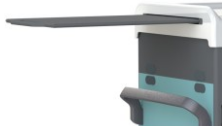

IDENTIFICATION

**STICKER IDENTIFICATION
PERSONNALISABLE - EN
OPTION**

OP-ID



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BAC À PLÂTRE
SUR EASYCLIP (BAC TIROIR
1/2 HAUTEUR 155 NON
INCLUS) (COMP. V2 & M3)**

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE XL POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x
JUSQU'A 20L DOUBLE
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**DOSSIERS SUSPENDUS
CARTON POUR
CONTENEUR À DOSSIERS -
QUANTITE 25**

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI
SÉLECTIF (2X) (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 155 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 075 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS ARRIÈRE
FILAIRE (SANS BAC)
MODALLI LOGISTALLI
(COMP. V2 & M3)**

AC-M21037SC



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS FILAIRE
AVANT (SANS BAC)
MODALLI LOGISTALLI
(COMP. V2 & M3)**

AC-M21037SCAV



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE -
POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE
VOLCANIQUE (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &
M3)**

AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS
SUSPENDUS NOIR AVEC
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À
AIGUILLES NOIR
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

TABLETTE ÉCRITURE RABATTABLE

AC-TAB-ECRITOIRE



INFORMATISATION

ACCESSOIRES POUR SUSPENSION D'ÉCRAN SUR PORTIQUE AVEC PLATINE WESA 100/75 INCLINABLE ET RÉGLABL ...

AC-PLWER



INFORMATISATION

ACCESSOIRES POUR SUSPENSION D'ÉCRAN SUR PORTIQUE AVEC PLATINE WESA 100/75

AC-PLWE



INFORMATISATION

CÂBLE DE SÉCURISATION NOIR VOLCANIQUE (COMP. V1 & V2)


AC-M77910



INFORMATISATION

BLOC 6 PRISES BLANC MONTÉ (COMP. V1,V2 & M3)

AC-M21041MZ

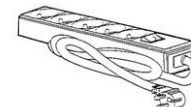

INFORMATISATION

BRAS INFORMATIQUE (COMP. V2) AVEC SUPPORT TABLETTE

AC-M77897SZ-TABLETTE



INFORMATISATION

PLATINE FIBRES VEGETALES POUR BRAS INFORMATIQUE (COMP. M3)

AC-M77941R-M3



INFORMATISATION

BRAS INFORMATIQUE POUR CHARIOT "SANS PORTIQUE"

AC-M77897-PLAT-M3



ÉQUIPEMENT

LIAISONS RAIL (2 PIÈCES)

AC-JONRAIL



ÉQUIPEMENT

ATTELAGE POUR CHARIOTS (LOT DE 2)

AC-M21088MA



ÉQUIPEMENT

BANDE ADHÉSIVE ALU AIMANTÉE POUR RAIL (COMP. V1 & V2)

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

BANDE VELCRO BLEUE LONGUEUR 5 M À COUPER

CO-M77885



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 3 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 4 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 6 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 5 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-M77882



PORTE-CONTENANT

ENSEMBLE 6 CROCHETS COMPATIBLE PORTIQUE ET RAIL EASYCLIP

AC-SUP5C



PORTIQUE

RAIL RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR PORTIQUE

AC-RAIL-POR-REG



PORTIQUE

ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE

AC-ETAGERE-PORT



PORTIQUE

PORTIQUE 2 RAILS

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

PORTIQUE 2 ETAGERES

AC-PORT-2-ETAG



Accessoires

PORTIQUE

**PORTIQUE 1 RAIL ET 1
ETAGERE**

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

**RAIL REGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-REG



PORTIQUE

**PORTIQUE AVEC 2 RAILS
REGLABLES EN HAUTEUR**

AC-PORT-2-RAILSREG





PORTIQUE

**PORTIQUE SUPPORT
INFORMATIQUE**

AC-M21031INF-M3



Composants

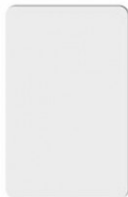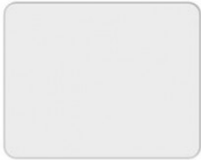
BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM PLEIN CO-BAL200PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ CO-BAL200AT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN CO-BAL50PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN CO-BAL100PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ CO-BAL100AT 	BAC À LÈVRES BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC CO-BA 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ CO-PL200AT 
PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ CO-PC200AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ CO-PL100AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN CO-PL100PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ CO-PC100AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN CO-PC100PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN CO-PC50PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN CO-PL50PT 
PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC CO-CTP 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50) CO-M24534VB 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL CO-M77816VB 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77817 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50) CO-M77937V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50) CO-M77938V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M77937 

Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M77938

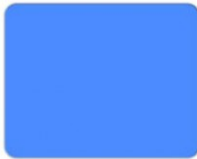

TIROIR

**ÉQUIPEMENT DE TIROIR
POUR DOSSIERS
SUSPENDUS BLANC**

CO-M21022MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR
235 MM**

CO-M24504MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR
155 MM**

CO-M24503MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR
075 MM**

CO-M24502MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC
AVEC PORTE ET SERRURE
MÉCANIQUE HAUTEUR 155**

CO-M21046MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC
AVEC PORTE ET SERRURE
MÉCANIQUE HAUTEUR 235**

CO-M21047MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC
AVEC PORTE ET SERRURE
MÉCANIQUE HAUTEUR 075**

CO-M21045MC



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ :
COUVERCLES DU TIROIR À
TOXIQUES BLANC AVEC
CHARNIÈRE ET PATTES
ARRIÈRES (NÉCESSI ...**

CO-M77873



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ BLANC
HAUTEUR 235**

CO-M77879



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ BLANC
HAUTEUR 155**

CO-M77878



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ :
COUVERCLES DU TIROIR À
TOXIQUES BLANC SANS
CHARNIÈRE AVEC PATTES
ARRIÈRES (NÉCES ...**

CO-M77874



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ BLANC
HAUTEUR 075**

CO-M77877



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ :
COUVERCLES DU TIROIR À
TOXIQUES BLANC SANS
CHARNIÈRE - SANS PATTES
ARRIÈRES**

CO-M77875



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 235 LONG**


CO-M46027F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 235 COURT**

CO-M46028F6

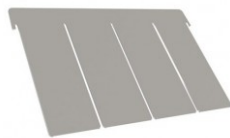

PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 075 LONG**

CO-M46034F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 075 COURT
SPECIAL PETER'S**

CO-PCP0570



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 155 LONG**

CO-M46029F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 075 COURT**

CO-M46035F6











PEIGNES POUR TIROIR




**PEIGNE TIROIR BLANC -
HAUTEUR 155 COURT**

CO-M46030F6

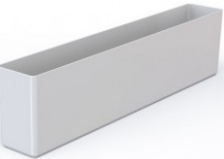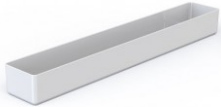


BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/2 CO-M77888 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 155 1/4 CO-M24508MC 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 155 1/2 CO-M77889 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/6 CO-M24506MC 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/4 CO-M24507MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE CO-M24523MPL 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES CO-M24523MP 
BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2 CO-M77887 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2 CO-M77886 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L CO-M24522MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE CO-M24509MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE CO-M24510MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 CO-M24510MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L CO-M24512MC 
BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6 CO-M24523MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 CO-M24511MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6 CO-M24509MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6 CO-M24513MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4 CO-M24514MC 	SÉPARATEURS BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION) CO-M24526MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4 CO-M24515MC 

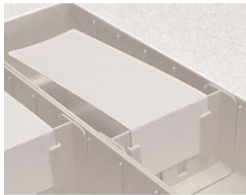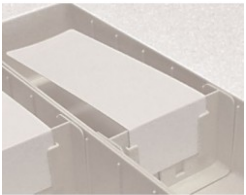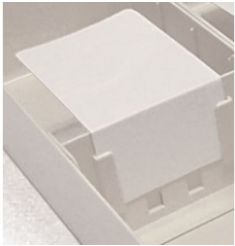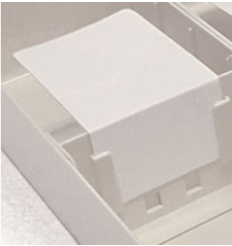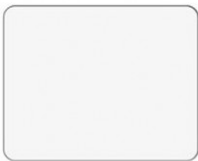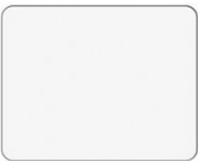SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6 CO-M24525MC 	SÉPARATEURS BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC TIROIR) CO-M24530MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 120 1/6 POUR BAC 120/6 AVEC POIGNÉE CO-M24525MS 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 155 1/8 CO-M24620MC 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/18 CO-M24615MC 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/12 CO-M24617MC 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/8 CO-M24618MC 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100) CO-M77915 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100) CO-M77915 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100) CO-M77906 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100) CO-M77906 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100) CO-M77905 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100) CO-M77905 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10) CO-M77816V 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10) CO-M77816V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77816 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77816 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50) CO-M24534V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50) CO-M24534V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M24534MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M24534MZ 

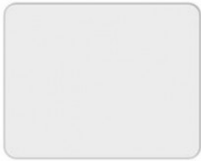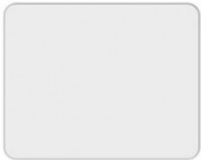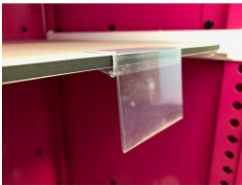PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6 CO-M24610MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6 CO-M24610MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4 CO-M24611MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4 CO-M24611MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR) CO-M77815 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR) CO-M77815 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM CO-M24535SZ 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM CO-M24535SZ 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5) CO-M77826 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5) CO-M77825 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5) CO-M77827 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5) CO-M77828 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION CO-M24532MC 	ÉTAGÈRES EN ABS ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES) CO-M77899 
ÉTAGÈRES EN ABS ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS CO-M24505MS 	ÉTAGÈRES EN ABS ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD CO-M24505MC 	ÉTAGÈRES EN COMPACT ÉTAGÈRE TRESPA F600 CO-M77884 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE CO-M77907 	ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ... ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE CO-MEC70002 	ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ... ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE CO-MEC70001 	ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ... PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC CO-MEC70003 

Composants

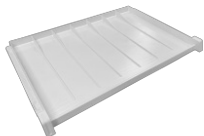ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ... SYSTÈME OUVERTURE BLANC CO-SOBJ 	BAC JOURNALIER SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE) CO-MEC70008 	BAC JOURNALIER SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE) CO-MEC70009 	BAC JOURNALIER BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE CO-MEC70012 	BAC JOURNALIER BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE CO-MEC70011 	BAC JOURNALIER PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS CO-MED038 	ENSEMBLE 8 PILULIERS ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE CO-M77900MA 
ENSEMBLE 8 PILULIERS PLATEAU PLUMIER - MAUVE CO-M77904MA 	ENSEMBLE 8 PILULIERS PILULIER PLUMIER - MAUVE CO-M77902MA 	ENSEMBLE 8 PILULIERS SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE) CO-M77903 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50) CO-MEC80020 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT GRAND MODÈLE (LOT DE 50) CO-MEC80021 	ÉTIQUETTES POUR PILULIER LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS) CO-M77901 	ÉTIQUETTES POUR PILULIER ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES) CO-MEZ80020 
ÉTIQUETTES POUR PILULIER ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES) CO-MEZ80021 	ÉTIQUETTES POUR PILULIER ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES) CO-MEZ8002001 	ÉTIQUETTES POUR PILULIER ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES) CO-MEZ8002101 	CASSETTE CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX CO-M24627MC 	CASSETTE CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX CO-M24627MS 	CASSETTE CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX CO-M24626MC 	CASSETTE CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX CO-M24624MC 

Composants

CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE
2 NIVEAUX

CO-M24623MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE 1
NIVEAU

CO-M24623MS



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 2 NIVEAUX

CO-M24622MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 3 NIVEAUX

CO-M24625MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 1 NIVEAU

CO-M24624MS



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

POCHETTE
AUTOCOLLANTE
TRANSPARENTE A4 (LOT
DE 5)


CO-M77859



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

SUPPORT AUTOCOLLANT
POUR SUPPORT-
ÉTIQUETTE TRANSPARENT
(LOT DE 5)

CO-M77880

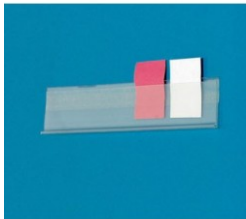

Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel

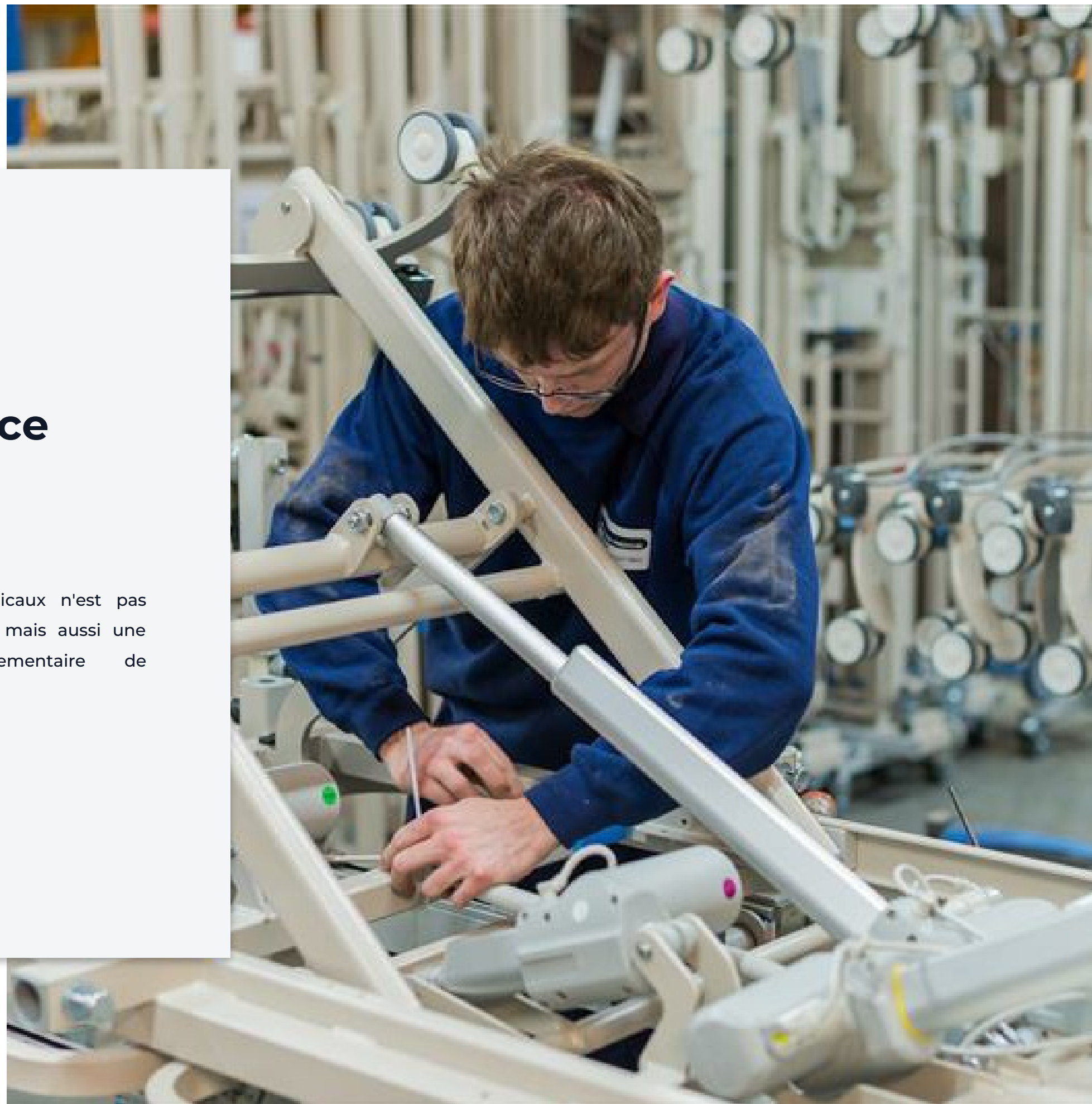

Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.A. La Fosse Neuve Route de Meslay
37210 - Parçay-Meslay

Tél +33 (0)2 47 88 58 85
clientfrance@hacare.com



Benoît LAMERANT
Responsable ventes France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44



Administration des ventes
clientfrance@hacare.com
+33 (0)2 47 88 58 85



Laurent CARRET
Rhône Alpes
axis-agence@wanadoo.fr
04 72 00 89 42



Pauline CEPPE
Centre
p.ceppe@hacare.com
06 28 75 52 19



Pascal CHEVALIER
Auvergne
pascal.chevalier@bptc.fr
04 77 22 44 22



Yann DOMZALSKI
Hauts de France
y.domzalski@hacare.com
06 12 33 74 58



Julien FROMENT
Sud Est
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Benoît LAMERANT
Paris, île de France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44



Julien LE BRUN
Bretagne
julien.le.brun@outlook.fr
06 62 47 46 28



Michaël MUNCH
Grand Est
m.munch@nexusicare.fr
06 17 17 10 64



Julien REDAUD
Sud Ouest
j.redaud@rj-sante.fr
06 62 92 58 66



HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-CHA-SMR-CHS-M3MCH-FR
2026